

Hava ile Yüzey Dezenfeksiyonu

Kritik alanlar:

- Sağlık Merkezleri
- İlaç Endüstrileri
- Araştırma Laboratuvarları
- Hayvan Deney Merkezleri



JOSE COLLADO, S.A.



Pratik kullanım

Büyük ve Küçük alanların dezenfeksiyonu

İş gücü tasarrufu

Satış sonrası teknik servis hizmeti

CE standartlarına uygun

Hassasiyet

Kullanımı kolay

Az yer kaplar

Kolay taşınabilir

Minimum kullanım maliyeti

Kullanışlı

Sağlam

İngiltere standartlarına uygun

Dezenfeksiyona karşı tam garanti

1



Bidonu AEROTURBEX'in arka tarafına yerleştirilir

2



Sabitlenme kemeri sıkılaştırılır.

3



Dezenfeksiyon emme hortumu bidonun altına kadar ittilir.

4



Bidon kapağı sıkıca kapatılır.





DİJİTAL ZAMANLAYICI KULLANIMI

5



Açma/Kapama
düğmesine bas.

6



İstenilen yayınım zamanı
dijital ekranda görününceye
kadar (+) veya (-)
butonlara bas.

7



Doğru yayınım zamanı
ayarlandığında start/stop
butonuna bas.
Mikro diffüzör çalışmaya
başlayacaktır.



Kritik alanlarda

DSVA NEDİR?

Kritik alanlarda “Hava yolu ile Yüzey dezenfeksiyonu (DSVA) biyosit gaz ve serpintilerin elektrotermik ve /veya pinömatik sistemler aracılığıyla hem yatay hem de dikey kirli (zehirli) yüzeyler üzerinde kemoprofilaktik faaliyetlerini yerine getirebilmesi için havanın aracı olarak kullanıldığı bir süreçtir.

DSVA yöntemleri ulaşılması zor veya en uzakta olanlarda dahil olmak üzere bütün mikrobiyolojik kirlilik düzeylerini önemli oranda azaltmaya olanak sağlar.

Bu sistem kullanıcıya çevresel mikrobiyolojik seviyelerinde %99,999 oranında azalma garantisi vererek doğrudan temas yoluyla yüzeylerin dezenfeksiyon / buharlı dezenfeksiyon yöntemlerinde vazgeçilmez bir tamamlayıcı rol üstleniyor.

DSVA'nın özellikle kritik alanlarda; klinik ortamlarında nezokimyasal enfeksiyonları önlemek için, ilaç endüstrisinde mikrobiyolojik kirlilik seviyelerini önemli düzeyde kontrol altına almak için ve bahsedilen alanlarda bulunan mikroorganizmalardan dolayı ortaya çıkan büyük problemleri önlemek için kullanıma uygundur



kapsamlı hijyen

AEROTURBEX®

DSVA yöntemleri JOSE COLLADO S.A'nın "Higieneintegral" departmanında yapılan araştırma ve geliřtirmelerinin meyvesi(Sonucu) olan moleküler ve pinömatik AEROTURBEX aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.Bu sistem, geleneksel pulverizasyon sistemlerinin aksine daha küçük boyutlarda aerosol üretmektedir.

Benzoil peroksitler hayvanlar ve insanlar için dilüsyon yöntemiyle düşük veya sıfıra yakın toksitlik oranıyla hem çabuk etki gösteren hamde çevreye saygılı bir üründür.

(Ürünün içeriğindeki maddeler zararsızdır) Bu moleküllerin üstün oksitlenme gücü sizlere biyosit bir ortam sağlar(Mikroplardan arındırılmış bir ortam)

Avantajları

- Hızlı çözünme özelliğı diğer biyositler (Mikroorganizmaları öldürücü)'e göre %70-%80 oranında çok daha kısa zamanda uygulandığı yerlerin kullanılmasına olanak sağlar.
- Düşük derecelerde daha hızlı çözüm sağlar.
- Organik maddelerin varlığında kolaylıkla çözülmez.
- Tamamen geri dönüşümlü ve yüzeyde tortu bırakmaz.



Terminal Forte SR®

İÇERİĞİ

Terminal Forte SR kritik alanlar için bakterist ,fungisidal,virüsidal ve mikro bakterisid ortam sağlayan perasetik asit ile oksijenli suyun biyosidal gücünü biraraya getirir.

AVANTAJLARI

- ✓ Hemen etkili
- ✓ Uygulanılan alanı kısa sürede kullanılabilir hale getirir.
- ✓ Yüzey durulaması gerektirmez.
- ✓ Zararsız (su ve oksijen) ve tehlikesiz(asetik asit) elementlerinden oluşan çözelti.
- ✓ Uygulama şekli,ulaşılması zor ve uzak alanlarda dahil tüm bölgelere ulaşım imkanı sağlar.

BİLEŞİM

TERMİNAL FORTE SR SOLÜSYON A:

Hidrojen peroksit.....%8,5
Stabilizatöerler, Korozyon İnhibitörleri,
Aktif yüzey, C.S.P.....%100

TERMİNAL FORTE SR SOLÜSYON B:


Perasetik Asit.....%5
Hidrojen Peroksit.....%20
Asetik Asit.....%10
Müdahiller.....%100

TERMİNAL FORTE SR (KARIŞIM A+B)

Hidrojen Peroksit.....%9
Perasetik Asit.....%0,25



TERMINAL FORTE SR UYGULAMASI

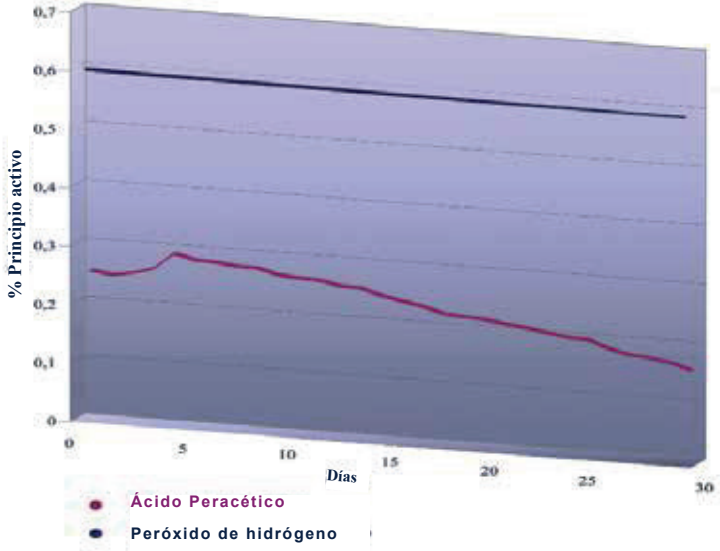

A ve B solüsyonlarını karıştırınca “Terminal Forte SR” elde edilir.

Bu ürün maksimum kullanım süresi olan 30 gün dayanabilecek kadar güçlendirilmiştir. Bu zaman zarfında, Havayolu ile Yüzey dezenfeksiyonu yöntemlerinde kullanılmaya devam edebilir, ürünün bakteri ve mantar yokedici etkinliği (etkisi) bilimsel araştırmalar aracılığı ile kanıtlanmıştır.

KULLANIM TALIMATI



Solüsyon çıkartılır.



A ve B solüsyonlarını kullanım için aç.
B solüsyonunu A Solüsyonunun bulunduğu kaba (Bidona) tamamını dök.



Kapağı sıkıca kapat ve homojen hale gelmesi için sallayarak karıştır.



Bidonun üzerine karışımın son kullanım tarihini yaz (30 günlük kullanım ömrü baz alınarak).



AEROTURBEX ile TERMINAL FORTE SR 'yi uygulayın.

- ✓ Kullanılacağı yerin önceden ön temizliği yapılması önerilir.
- ✓ 100 m² alan için 18 dakikalık uygulama yeterlidir.
- ✓ Uygulama sonrası güvenli zaman aralığı 4 saattir.

F-66 SR®

UYGULAMA ALANLARI

Sağlık Merkezleri

- ✓ Temizlikten önce ve sonra
- ✓ Enfeksiyon odaları
- ✓ Yanık üniteleri
- ✓ İzolasyon üniteleri
- ✓ Hastalık salgınları

İlaç Endüstrisi ve Hayvan Deney Merkezleri

- ✓ Karantina bölgeleri
- ✓ Steril laboratuvar odaları
- ✓ SPF Alanları(Specific pathogen free-“EN”)
- ✓ P3 alanları
- ✓ S.A.S

BİLEŞİM

Hidrojen Peroksit.....	%8
Stabilizatörler, Korozyon İnhibitörleri, Aktif yüzey, C.S.P.....	%100



Total Shock SR®

F-66 SR sađlık merkezleri, yařlı bakım evleri, ila endüstrisi, arařtırma merkezleri, hayvan deney merkezleri ve halk sađlığı için hijyenik ortamların gerekli olduđu insan gruplarının bulunduđu yerler için özellikle uygundur.

AVANTAJLARI

- ✓ Kokusuz.
- ✓ Ek maddelere ihtiyaç duymaz.
- ✓ Uygulanan alanın kısa sürede kullanılabilir hale gelmesini sađlar.
- ✓ Yüzey durulaması gerektirmez.
- ✓ Mikrobik kokuları yok eder.
- ✓ Tamamıyla zararsız (su ve oksijen) içerikten oluşur.
- ✓ Uygulama řekli, ulařılması zor ve uzak alanlarda dahil tüm bölgeye ulařmaya imkan verir.

UYGULAMA řEKLİ

- ✓ Uygulanacak alanda ön temizlik yapılması önerilir.
- ✓ 100 m² alan için 18 dakika uygulanması yeterlidir.
- ✓ Uygulama sonrası güvenli zaman aralığı 3 saattir.

BİLEřİM

Glutaraldehit.....	%2,5
Yardımcı madde C.S.P.....	%100



Reg. AEMPS: 532-DES

- **Standart AFNOR NF T 72-281(F66 SR/T.F.SR)**
 - ✓ Havayolu ile yüzey dezenfeksiyonu metodu. (Fransa)
- **Standart UNE-E 1276 y UNE-EN 1650 (F66 SR/T.F. SR)**
 - ✓ Ürünün bakteri emarur yok edici etkinliğinin sayısal testi.
Bioteknoloji laboratuvarı. (Barselona)
- **Standart UNE-EN 1276 y UNE-EN 1650 (T.F. SR)**
 - ✓ Ürünün bakteri emarur yok edici etkinliğinin sayısal testi.
Bioteknoloji laboratuvarı. (Barselona)
- **Standart UNE-EN 1276 y UNE-EN 1650 (T.F. SR)**
 - ✓ Ürünün bakteri emarur yok edici etkinliğinin sayısal testi.
Bioteknoloji laboratuvarı. (Barselona)
- **Standart UNE-EN 13704 (F66 SR/T.F. SR)**
 - ✓ Sporları öldürücü kimyasal dezenfektanın faaliyetlerinin belirlenmesi.
Genel tanı laboratuvarı. (Barselona)

Çalışmalar



- **Standart NF EN 14348 (F66 SR/T.F. SR)**
 - ✓ Mikrobiyosid kimyasal dezenfektanın faaliyetlerinin değerlendirilmesi için insan tedavilerinde kullanılan sayısal (deneysel) testler. (Fransa)
- **Standart NF EN 1276 y NF EN 14348(T.F. SR)**
 - ✓ Mikrobiyosid kimyasal dezenfektanın faaliyetlerinin değerlendirilmesi için insan tedavilerinde kullanılan sayısal (deneysel) testler. (Fransa)
- **Standart EN 14476:2007-02 (T.F. SR)**
 - ✓ Terminal Forte SR'nin kirli ortamlardaki 5.tip Adenovirüs'e karşı etkinliğinin derecelendirilmesi. (Almanya)
- **Standart EN 14476:2007-02 (T.F. SR)**
 - ✓ Terminal Forte SR'nin kirli ortamlardaki 1.tip çocuk felci virüsüne karşı etkinliğinin derecelendirilmesi. (Almanya)
- **Standart UNE-EN 1276 (F66 SR/T.F. SR)**
 - ✓ Genel Kullanımda ürünün bakteri öldürücü özelliğinin değerlendirilmesi. (Madrid)

**OLCAY SAĞLIK ÜRÜNLERİ**

İTH. İHR. PAZ. İNŞ. NAK. TUR.
DEK. TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Fabrika Mah, Mahabad Bulv.
Birtane Gold Office No: 2 / 39
Yenişehir / DİYARBAKIR - TÜRKİYE



Tel: +90.412 290 90 18

Fax: +90.412 290 89 75



www.olcaysaglik.com.tr

info@olcaysaglik.com.tr

Ankara İrtibat Ofisi

Atatürk Mah. Ankara Cad. Koçak İşhanı

No: 14/21 Sincan/Ankara

Tel: 0506 671 0434

e-mail:aydin.polat@olcaysaglik.com.tr



JOSE COLLADO, S.A.
LIDERES EN HIGIENE