

GETINGE CLEAN

Ürün Spesifikasyonu

Neutralizer

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Alkalili deterjanların nötrleştirilmesi ve tıbbi aletlerdeki ağır su kireci ve asitte çözünür minerallerin giderilmesi için yıkayıcı dezenfektörlerde kullanılan orta dereceli organik asit. Nötrleştirici, alkalili proseslerden sonra durulama suyunun pH değerini etkin biçimde azaltır. Paslanmaz çelik, seramik, cam ve plastik gibi tüm aside dirençli yüzeyler için uygundur.

KULLANIM TALİMATLARI

Nötrleştirme: dozaj aralığı 1-2 ml/lt. Sıcaklık aralığı 40-60°C.

Temizleme: >50°C'de 1-5 ml/lt dozaj aralığı.

Polikarbonat malzemede kullanmayın.

Prosesle maruz kalan tüm malzemelerin aside dirençli olduğundan emin olun.

Kullandıktan sonra iyice durulayın.

Diğer kimyasallarla karıştırmayın.

İÇİNDEKİLER

Sitrik asit

TEKNİK VERİLER

Özgül ağırlık (20°C'de): 1,1 (tipik)

belirtilen pH değeri (tipik): 1,2

pH (5ml/lt suda) (tipik): 2,2

Viskozite (konsantrat, 20°C): < 50 cps

MUHAFAZA BİLGİLERİ

Donmaya, alkaliye ve güçlü oksitleyici ajanlara karşı korumalı serin ve kuru bir yerde muhafaza edin.

Orijinal kaplarda dik konumda muhafaza edin.

En uygun muhafaza sıcaklığı 5-25°C arasındadır.

GÜVENLİK VE KULLANIM

Malzeme Güvenlik Veri Sayfası.

CE İŞARETİ

Neutralizer, tıbbi aletlerle ilgili AB Direktifi 93/42/EC, Ek 1'e uygundur.

ÇEVRESEL DUYARLILIK

Biyoçözünür formülasyon ve geri dönüştürülebilir ambalajlama.



Aletler



Neutralizer



Getinge deterjan ürünleri, Getinge yıkayıcılarında test edilmiş ve ISO 15883 tıbbi alet temizliği verimlilik standartlarına uygun bulunmuştur.



GETINGE CLEAN

Ürün Spesifikasyonu

Neutralizer

SERVİS

Uygun deterjan dozajı ve temizleme proseslerinin optimize edilmesi hakkında teknik destek almak için Getinge temsilcinizle görüşün.

GETINGE ELDE ve OTOMATİK YIKAMA DETERJANI ÜRÜNLERİ



	Alüminyum	Anotlanmış alüminyum	Titanyum	Demir içermeyen metaller	Mat krom kaplı	Paslanmaz çelik	Cam	Seramik	Kauçuk	Plastik
■ GETINGE CLEAN HEAVY SOIL DETERGENT			M		●	●	●	●	●	M
■ GETINGE CLEAN UNIVERSAL DETERGENT	M	M	M	M	●	●	●	●	●	M
■ GETINGE CLEAN ENZYMATIC DETERGENT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	M
■ GETINGE CLEAN NEUTRALIZER	M	M	●	●	●	●	●	●	M	M
■ GETINGE CLEAN RINSE AID	●	●	●	●	●	●	●	●	M	M
■ GETINGE CLEAN INSTRUMENT LUBRICANT	●	●	●	●	●	●				
■ GETINGE CLEAN INSTRUMENT PRETREATMENT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Bu şema sadece bir rehber niteliğindedir ve üretici tarafından tıbbi aletlerin yeniden işlenmesine yönelik verilen EN ISO 17664 talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.

M=Her zaman alet üreticisinin talimatlarına başvurun.

SİPARİŞ NO.

5 l	10 l	25 l	205 l
503435809	503435909	503436009	503436109

GETINGE

GETINGE GROUP

Getinge Disinfection AB, Ljungadalsgatan 11
Box 1505, SE-351 15 Växjö, İsveç
Telefon: +46 (0)10 335 98 00
Web: <http://www.getinge.com>
E-posta: info.disinfection@getinge.com