



Renk Değişim Değerlendirme Tablosu

BUHARA MARUZ KALMAMIŞ ENTEGRATÖR

Bütün noktaların eflatun renginde olması entegratörün sterilizasyona maruz kalmadığını gösterir.

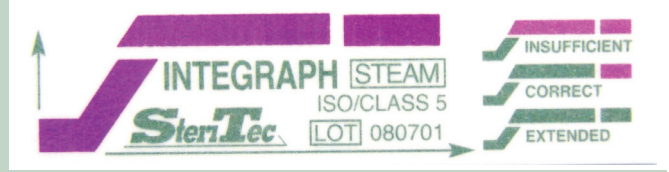

DOĞRU RENK DEĞİŞİMİ OLAN ENTEGRATÖR

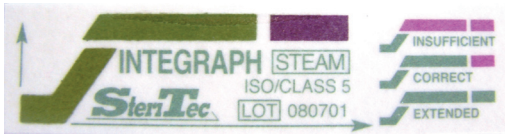


İlk iki noktanın renginin tamamen yeşile dönüşmesi yeterli sterilizasyon koşullarının sağlandığını gösterir.

DOĞRU RENK DEĞİŞİMİ VE SÜRESİ UZATILMIŞ ENTEGRATÖR



Üç noktanın da tamamen yeşile dönüşmesi süresi uzatılmış sterilizasyon döngüsünü gösterir.

YETERSİZ ŞARTLAR OLAN ENTEGRATÖR

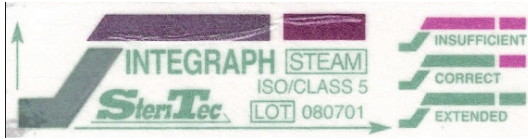

İlk iki noktanın renginin tamamen yeşile dönüşmemesi sterilizasyon koşullarının yetersiz olduğunu gösterir.

AŞIRI STERİLİZASYONA UĞRAMIŞ OLAN ENTEGRATÖR



Normal bir döngü sırasında son nokta tamamen yeşile dönerse sterilizasyon işlemine aşırı maruz kalmanın göstergesidir.

KURU BUHARA MARUZ KALAN ENTEGRATÖR



Eğer entegratörün üç noktası da koyu kahve renge veya siyah renge dönerse sterilizasyon çok fazla ısıyla gerçekleşmiş demektir.

ISLAK BUHARA MARUZ KALAN ENTEGRATÖR



Eğer eflatun veya yeşil renk bulanık görünüyorsa ve entegratör üzerindeki film tabakası buruşmuş, kabarcıklar oluşmuşsa, ıslak buhar veya aşırı yoğunlaşma var demektir.



Öz Anadolu San. Sitesi
1459 Sokak No: 36
İvogsan/ANKARA
Tel : 0(312) 394 00 64
Fax : 0(312) 395 72 95
www.cansaglik.com.tr
can@cansaglik.com

can sağlık



Steritec Products Mfg., Inc. 74 Inverness Drive
East, Englewood, CO 80112 USA
Ph: (303) 660-4201 Fax: (303) 660-4213
e-mail: info@steritecproducts.com