

SteriTec Wash-Checks®

Tek Kullanımlık Yıkama İndikatörü ve
Çok Kullanımlık Holder

WC 101



KULLANIM TALİMATLARI

RENK DEĞİŞİM TABLOSU



İşlem Görmemiş
Yıkama İndikatörü



Geçerli Sonuç



Geçersiz Sonuç



Geçersiz Sonuç



Geçersiz Sonuç



Geçersiz Sonuç

SteriTec Wash-Checks Tek Kullanımlık Yıkama İndikatörü yıkama süresi boyunca yıkama etkinliğini izlemek için tasarlanmıştır.

1. Wash-Checks İndikatörü Wash-Checks Aparatına (Holder)'na tamamen yerleştiriniz. Test indikatörünü ön yüzü, aparatın penceresinde görülmelidir.

2. Wash-Checks 'i bir sepet içerisinde yukarı bakacak şekilde yerleştiriniz. Sepeti yıkayıcı içinde bir rafa koyunuz. Wash-Checks yerleşim pozisyonunu ve raflarını döngüden döngüye değiştiriniz.

3. Yıkayıcı dezenfektörünüzü tam yıkama döngüsünde çalıştırınız.


Yıkama dezenfektörlerinizin yıkama etkinliğinin monitörizasyonu için her bir döngüde en az bir adet Wash-Checks İndikatörünün kullanımı tavsiye edilir.

4. Yıkama döngüsünün sonunda, aparatın Wash-Checks indikatörünü çıkarınız ve sonucu okuyunuz.

Dikkat: Wash-Checks Aparat ve indikatörü hala sıcak olabilir! Dikkatlice çıkarınız.

5. Wash-Checks indikatörünün dezenfektördeki konumunu , ince uçlu su geçirmez işaretleyici ile kayıt edebilirsiniz.

6. Wash-Checks kayıt defterine Wash-Checks'i zımbalayınız ve gerekli bilgilerini doldurunuz, kalıcı bir kayıt olarak saklayınız.

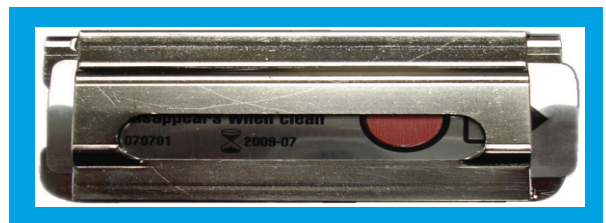

SteriTec

Steritec Products Mfg., Inc. 74 Inverness Drive
East, Englewood, CO 80112 USA
Ph: (303) 660-4201 Fax: (303) 660-4213
e-mail: info@steritecproducts.com