


SteriTec Wash-Checks U®

Tek Kullanımlık Ultrasonik Yıkama İndikatörü
ve Çok Kullanımlık Holder

WC 108

KULLANIM TALİMATLARI

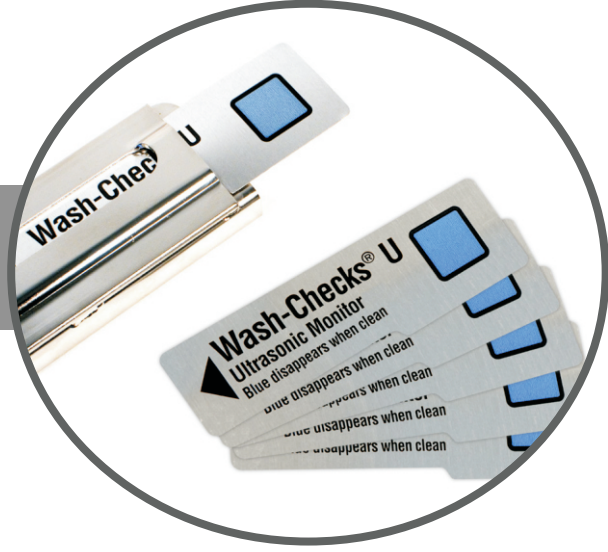

RENK DEĞİŞİM TABLOSU



İŞLEM GÖRMEMİŞ İNDİKATÖR




GEÇERLİ SONUÇ



GEÇERSİZ SONUÇ

SteriTec Wash-Checks U ultrasonik yıkama cihazlarının etkin temizlik kontrolü için tasarlanmıştır.

1. Wash-Checks U İndikatörünü aparatın (Holder) içerisine yerleştiriniz
2. Ultrasonik yıkama cihazınızı çalıştırıp indikatörlü aparatı koyunuz normal yıkama prosedürünüzü izleyiniz ultrasonik yıkama işleminiz bittikten sonra yıkama indikatörü üzerindeki derivelere tamamen yok olması gerekmektedir.
3. İndikatör üzerinde Herhangi bir derivenin bulunması halinde test yetersiz demektir uygun ultrasonik koşullar sağlanamamıştır.
4. Ultrasonik Yıkama cihazı yıkama etkinliğinin monitörizasyonu için her bir döngüde en az bir adet Wash-Checks U İndikatörünün kullanımı tavsiye edilir.
5. Monitörizasyon işlemi bittikten sonra kayıt defterinize Wash-Checks U İndikatörünü zımbalayınız

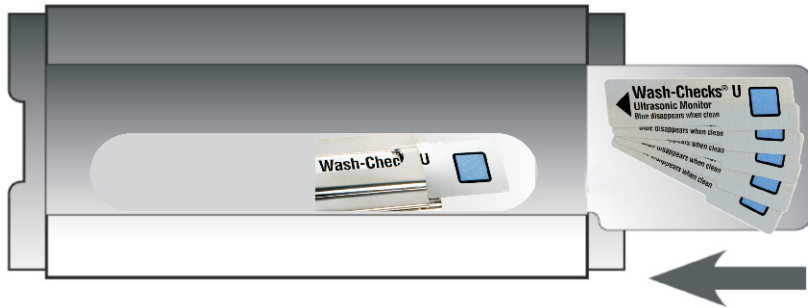

SteriTec

Steritec Products Mfg., Inc. 74 Inverness Drive
East, Englewood, CO 80112 USA
Ph: (303) 660-4201 Fax: (303) 660-4213
e-mail: info@steritecproducts.com