


SteriTec Wash-Checks H®


Tek Kullanımlık Lümenli Malzeme Yıkama indikatörü
ve Çok Kullanımlık Holder

WC 105

KULLANIM TALİMATLARI

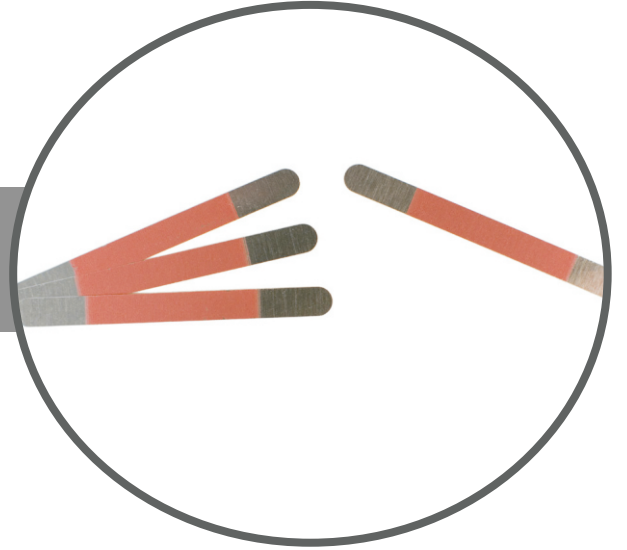

RENK DEĞİŞİM TABLOSU

 İŞLEM GÖRMEMİŞ İNDİKATÖR

 GEÇERLİ SONUÇ

 GEÇERSİZ SONUÇ


Yıkayıcı Dezenfektördeki fleksibl ve rijid görüntüleme aparatlarının yıkama işlemini rutin olarak kontrol eder.

1. Wash-Checks H İndikatörünü lümenli aparata yerleştiriniz. dezenfektördeki lümen portunu aparata bağlayınız. ve normal yıkama prosedürünü takip ediniz.
2. Yıkama işlemi sonunda Wash-Checks H aparatını açıp içindeki indikatöre bakınız indikatör üzerindeki derive'lerin tamamen yok olması gerekmektedir.
3. Lümenli malzemelerin monitörizasyonu için dezenfektörlerinizin her bir yıkama döngüsünde en az 1 adet kullanılması tavsiye edilir.
4. Wash-Checks H indikatörü kullanılan lümenli malzemeleri tamamen temizlenmesini kontrol etmek için tasarlanmıştır.

İndikatörleri Wash-Checks H Aparatı (WC-106) veya Fleksibl Wash-Checks E Aparatı (WC-107) ile birlikte kullanınız.



WC 106

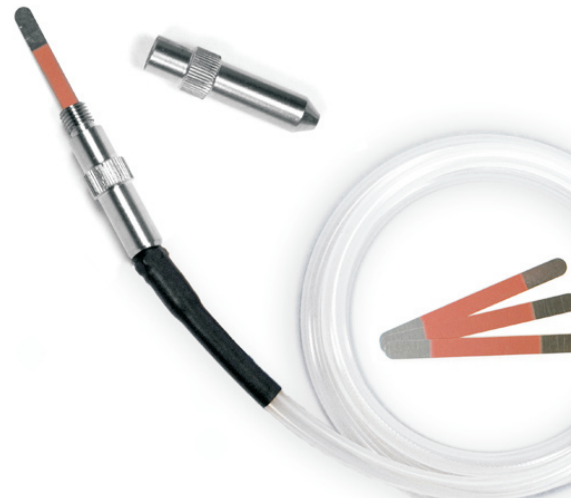

WC 107

SteriTec

Steritec Products Mfg., Inc. 74 Inverness Drive
East, Englewood, CO 80112 USA
Ph: (303) 660-4201 Fax: (303) 660-4213
e-mail: info@steritecproducts.com